

FASCIAL GUN GB-620 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL!

A FASCIAL GUN GB-620 egy élenjáró masszázs készülék, amely vibrációs hullámokat kifejtve javítja a test általános állapotát.

A FASCIAL GUN GB-620 az ipar legjobb komponenseinek felhasználásával készült el, biztosítva ezzel a megfelelő mennyiségű vibrációt.

A FASCIAL GUN GB-620 minden korosztály számára ajánlott, egyaránt kifejti jótékony hatását a test általános állapotára, valamint fokozza: a gyógyulási folyamatot, rugalmasságot, mozgástartományt, továbbá komfortos érzést kelt, ezáltal javítja az általános állapotot.

TÖLTÉS

- Első használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket 6 órán keresztül.
- Töltéshez csatlakoztassa a 24 V-os adapter DC végét az akkumulátor töltő csatlakozójához és dugja be az adapter AC végét a fali aljzatba.
- Az akkumulátoron elhelyezkedő LED sáv villogással fogja jelezni a töltöttségi szintet és az aktív töltés állapotát.
- Mikor tölt a készülék, a villogó LED-ek fogják jelezni a töltöttségi szintet és az aktív töltést.
- Teljesen akkor töltődik fel a készülék, ha megszűnik a villogás és minden LED világítva marad.
- Az akkumulátor bármikor feltölthető, a töltöttségi állapottól függetlenül.
- Nem ajánlott teljesen lemeríteni a készüléket (ezt egy piros LED jelzi)
- Az átlagos használati idő a beállított sebességtől és erősségtől függően kb. 2 óra . HASZNÁLAT
- Illesse az akkumulátort az alapegységbe. Győződjön meg róla, hogy jól rögzítette.
- A készülék bekapcsolásához kapcsolja ON állásra a kapcsolót az akkumulátor alján. A készülék kikapcsolásához kapcsolja OFF állásra a kapcsolót az akkumulátor alján.
- A kapcsoló ON állásba helyezése után nyomja meg a POWER gombot. Nyomja meg egyszer az első, kétszer a második, háromszor a harmadik erősségi fokozat eléréséhez. A POWER gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a készüléket. A kék LED fény fogja jelezni a megfelelő erősségi szintet.
- Nyomással illesse be az applikátort. Kihúzással távolítsa el az applikátort.
- A megfelelő erősséget a kezelt területnek megfelelően állítsa be.

FENNTARTÁS, TISZTÍTÁS, TÁROLÁS

- enyhén nedves ronggyal törölje át, majd egy szárazzal
- használaton kívül vagy szállításhoz távolítsa el az akkumulátort, majd azt tegye egy kartondobozba

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne tegye vízbe. Tartsa távol folyadéktól vagy hőforrástól. Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat a portól és törmeléktől.
- Ne távolítsa el a csavarokat és ne próbálja szétszerelni.
- Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb ideig. Hagyja pihenni a gépet kb. 30 percig mielőtt újra használná.
- Használat előtt csatlakoztassa le a csatlakozót töltőről.
- Kizárólag felnőttek használhatják. Ne használja ha az eszköz sérült. Konzultáljon orvosával mielőtt használná a terméket.

ÁBRA

1. Power ON/OFF
2. Power kapcsoló
3. Akkumulátor szint jelző LED (zöld, piros)
4. Frekvencia szint jelző LED (kék)
5. Levehető akkumulátor
6. Akkumulátor eltávolító gomb
7. Eltávolítható, cserélhető applikátor Határozottan húzza meg eltávolításhoz

8. DC töltő port.

9. AC töltő port.

Az akkumulátor eltávolításához gyengén nyomja meg az akkumulátor eltávolító gombot hüvelykujjával. Határozottan húzza lefelé az akkumulátort/kezelje másik kézzel.

SPECIFIKÁCIÓK

AC töltő: 110-240V 50/60Hz 7A-24VDC – 1A

Ütésszám (BPM)/Frekvencia (Hz): 1 szint – 1800/30, 2 szint – 2400/40, 3 szint: 3200/53 Súly: 2.5 lbs/1.1 kg (3.0 lbs/1.4kg töltővel együtt) USA-ban tervezve, Kínában összeszerelve.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS, TŰZ, SZEMÉLYES SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBIK SZERINT HASZNÁLJA A TERMÉKET:

- Kizárólag felnőttek használják
- Kizárólag száraz, tiszta testfelületen alkalmazzák ruhán keresztül, enyhe nyomást kifejtve és régióként kb. 60 másodpercig alkalmazva.
- Kizárólag lágyszöveten alkalmazza a FASCIAL GUN GB-620 készüléket a panaszoknak megfelelően fájdalom vagy diszkomfort érzés okozása nélkül. Ne használja kemény csontos területen pl koponyán.
- A lehető leghatékonyabb hatás elérése érdekében használja az applikátort.
- Kisebb zúzódások előfordulhatnak függetlenül a beállítástól és az alkalmazott nyomási erősségtől. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal hagyja abba a kezelést fájdalom vagy diszkomfort érzés esetén
- Tartsa távol haját, ujjait vagy más testrészét az applikátor hátuljától a becsípődés veszélyének elkerülése végett.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőnyílásaira.
- Ne merítse vízbe a készüléket, vagy engedje hogy víz folyjon a szellőzőnyílásokba.
- Ne ejtse le a készüléket.
- Kizárólag a termék saját töltővel töltsen fel a készüléket.
- Gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort minden használat előtt.
- Ne károsítsa meg a készüléket és annak működését.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt működés vagy töltés közben.

KÉRJÜK NE HASZNÁLJA A FASCIAL GUN HF-280-at VAGY MÁS VIBRÁCIÓS KÉSZÜLÉKET AZ ORVOSA ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSA NÉLKÜL, HA AZ ALÁBBIAKBÓL VALAMELYIK FENN ÁLL ÖNNÉL:

Terhesség, diabétesz szövődeményekkel mint neuropátia (érzéktelenség) vagy retina sérülés, pacemaker viselése során, közelmúltban történt műtétek után, epilepszia vagy migrén, porckorongsér, spondylolisthesis, spondylolysis, spondylosis, endoprotézis, méhen belüli spirál, fém csavar vagy lemez vagy bármilyen fém implantátum. Gyermekek és mentálisan sérült egyének felnőtt jelenlétében használhatják ezt a vibrációs eszközt. A fent felsorolt kontraindikációk nem zárják ki az eszköz használatának lehetőségét, viszont orvossal való konzultáció kell hogy megelőzze. Jelenleg is folynak a kutatások annak érdekében hogy a fenti kontraindikációk listáját lerövidítsék. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a vibrációs kezelés terápia tervbe való integrálása, számos esetben javallott. Kezelések végrehajtása előtt konzultáljon orvossal, specialistaival, fizioterapeutával.