

Termékbemutató

Termék neve: Váll- és nyakmasszírozó készülék

Névleges bemenet: 5 V

Termékmodell: FH-670

Névleges teljesítmény: 10 W

Akkumulátorkapacitás: 2000 mAh

[Figyelem] Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket. Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A frissítésokről külön értesítést nem küldünk.

Termékjellemzők



Dupla tenyér gyúrás és masszáz. Valódi tenyérmasszázs érzület, érintés és gyúrás tűz ujjal, pontosan masszírozza az akupunktúrás pontokat.



Eros teljesítményt biztosít. Kefe nélküli, csendes motorral felszerelve, élvezze a kényelmes masszázst.



Egyedi, bőrbarát anyag. Élelmiszeripari minőségű szilikonból készült, az érintés olyan finom, mint az emberi kéz.



Egyszerű gombos kialakítás. Egy kattintásos működés, könnyű indítás, élvezze a kényelmes masszázselményt.





A termék könnyű és hordozható. A teljes készülék súlya mindössze 760 g, ami csökkenti a vállakra nehezedő terhet és megkönnyíti a hordozást.



Meleg tenyérborogatás. Állítsa be a hőmérsékletet tetszése szerint, helyezzen forró borogatást a tenyérre gyúrással és masszírozással, így a melegség eléri a bőr alját.


Termékfelépítés

TÓL

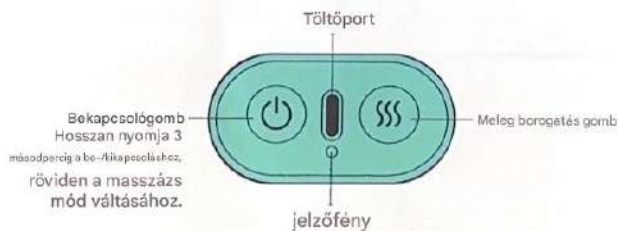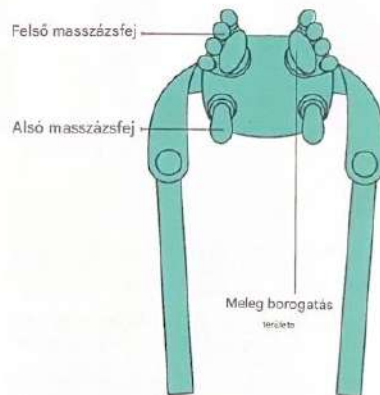

A gombdiagram csak a kézikönyv egyszerű olvasását szolgálja, kérjük, tekintse meg a tényleges működést.

Termékleírás

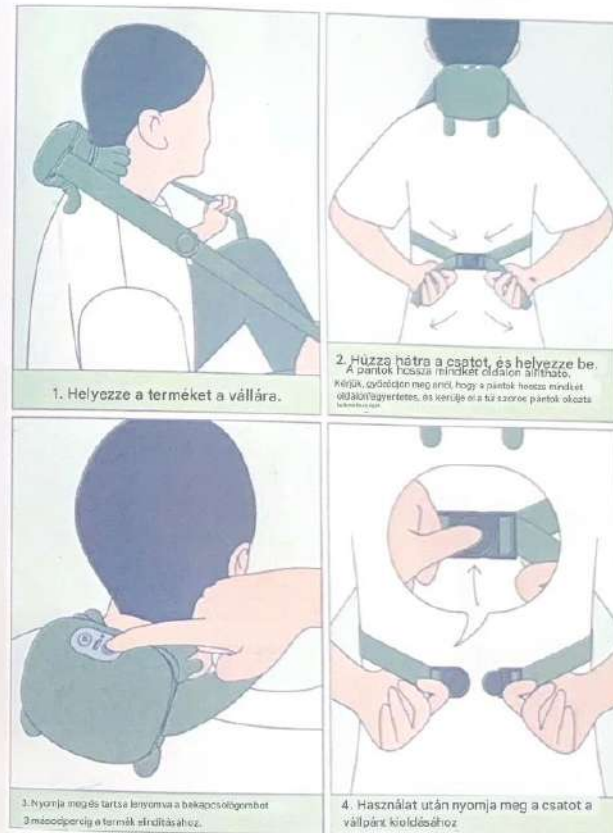

Gombhasználati utasítás

【Be/Ki】

Hosszan nyomja meg a **[]** gombot a be-/kikapcsoláshoz. Bekapcsoláskor a fehér jelzőfény kigyullad, és a készülék alapértelmezetten az 1-es masszázsmódra és az alacsony meleg borogatási módra vált.

*Egyetlen masszázs alapértelmezett időtartama 10 perc, amíg a készüléket ki nem kapcsolják, és a fehér fény ki nem alszik a munka befejezése után.

【Masszázs mód váltása】

Bekapcsolt állapotban az alapértelmezett mód az 1-es masszázsmód.

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a **[]** gombot az üzemmódok váltásához a következő sorrendben: 1-es masszázsmód (fehér fény egyszer felvillan) → 2-es masszázsmód (fehér fény kétszer felvillan) → 3-as masszázsmód (fehér fény háromszor felvillan), ciklusonként. A masszázsmód kapcsoló nem befolyásolja a forró borogatás pozícióját.

【Meleg borogatás fokozatváltása】

Bekapcsolt állapotban az alapértelmezett beállítás az alacsony szintű forró borogatás

Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a **[]** gombot a fokozatok váltásához, és sorrendben: Alacsony szintű forró borogatás (a piros lámpa egyszer felvillan) → Magas szintű forró borogatás (a piros lámpa kétszer felvillan) → Kapcsolja ki a forró borogatást (a forró borogatás területén lévő piros lámpa kialszik), végezze el a következő ciklust. A forró borogatás mód váltása nem befolyásolja a masszázs módot.

【Töltés emlékeztető】

Bekapcsolt állapotban a saját jelzőfény folyamatosan világít.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a piros lámpa folyamatosan villog, emlékeztetve a töltésre.

Töltés közben a piros lámpa folyamatosan világít.

Töltés után a fehér lámpa folyamatosan világít.

Óvintézkedések

⚠️ Danger

Ne használja együtt a következő orvosi elektronikus eszközöket, mivel ezek hibás működést okozhatnak és életveszélyt okozhatnak.

Beültethető orvosi elektronikus eszközök, például pacemakerek.

Életfenntartó orvosi elektronikus eszközök, például mesterséges szív és tüdő.

Orvosi elektronikus eszközök, például elektrokardiográfok.

▲ Figyelem

A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót

Ha a termék rendellenességei miatt rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a használatát. Ha bármilyen szokatlan érzést tapasztal a testében vagy a bőrén, forduljon orvoshoz és kövesse az utasításait.

Ha olyan rendellenes helyzet áll elő, amelyben a termék nem működik, azonnal kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki, különben magas hőmérséklet, rövidzárlat vagy szakadás léphet fel.

Baleset esetén kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőkábelt nedves kézzel, mert ez áramütést vagy balesetet okozhat.

Ne viseljen nyakláncot használat közben.

Ne használja fekvő helyzetben.

Gyúlékony és robbanásveszélyes helyeken, például benzinkutaknál, magas portartalmú műhelyekben és benzinkutaknál tilos a használata.

Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy párás környezetben.

Ne használja a terméket vezetés, mászás vagy más veszélyes

tevékenység közben, mivel ez veszélyt vagy sérülést okozhat.

Ne használja alvás közben vagy tökéletlen eszmélet állapotban.

Ne engedje, hogy csecsemők, gyermekek vagy olyan személyek, akik teljesen vagy részben elvesztették az eszméletüket, érintkezzenek a termékkel, és ne engedje, hogy használják azt különben balesetet okozhat.

A 65 év feletti idősök bőre sérülékeny, az idegvégződések pedig érzéketlenek. Használat előtt konzultáljon orvosával, és szigorúan ellenőrizze a használati időt.

Ne használja sérült vagy műtéti területen.

Kezelésen részt vevő vagy fizikai rendellenességeket mutató betegek nem használhatják. Ne alkalmazza kellemetlen tünetek, például nyaki bőrkárosodás, bőrpír, duzzanat, gyulladás, gennyesedés és véraláfutás esetén.

Ne alkalmazza szívbetegség, akut betegség, rosszindulatú daganat, vagy neurológiai rendellenesség esetén.

Ne alkalmazza magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, vérzési hajlam, csontritkulás, légúrbetegség és stroke esetén