


HASZNÁLAT:


1. Helyezze a Handy Heater Freedom-ot a nyakába.

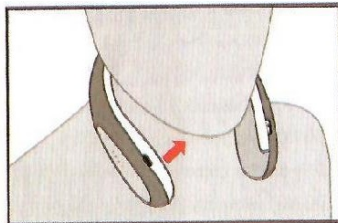

2. Az egység áramellátásának ellenőrzéséhez az egység bekapcsolása előtt nyomja meg az oldalán található bekapcsológombot a bekapcsoláshoz. A jelzőfények világítanak, jelezve, hogy az egység áram alatt

van. Nyomja meg a bekapcsológombot 2-3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Bekapcsoláskor a fűtés alapértelmezés szerint ALACSONY. A gomb minden egyes megnyomásával a készülék megemeli a hőmérsékletét. 4 fűtési fokozat van.

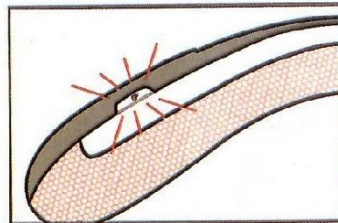

3. Ha végezt, nyomja meg a bekapcsológombot, amíg az egység ki nem kapcsol. Tárolja hűvös, száraz helyen a következő felhasználásig.

KARBANTARTÁS:

Ha nem használja, ügyeljen arra, hogy a Handy Heater Freedom készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.

Szükség szerint tisztítsa meg a foltot nem súroló ronggyal.

HASZNOS FŰTÉS

SZABADSÁG




Termékismertető

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Gratulálok!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Handy Heater Freedomot. Ez a nagy teljesítményű, hordható fűtélem fejlett technológiával rendelkezik, hogy a leghidegebb napokon is finoman felmelegítse a nyak hátsó részét és a vállát. Egyszerűen igazítsa a terméket a nyakába, és élvezze az azonnali meleget... bárhol!

MI TARTALMAZ:

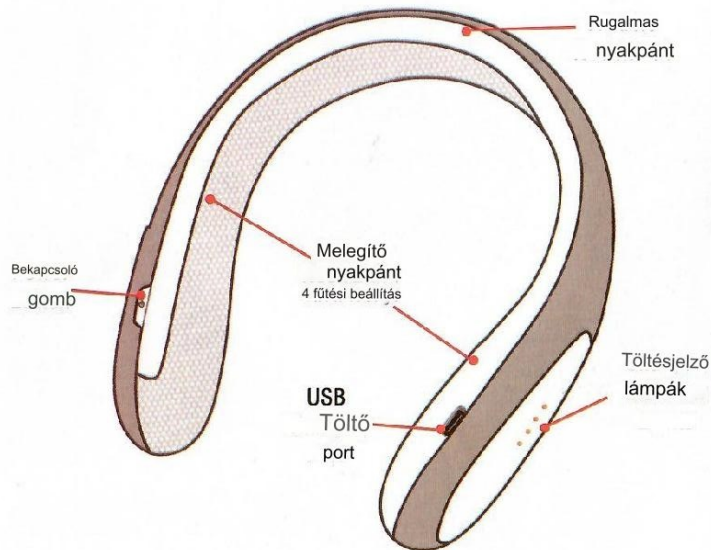


AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE:


A Handy Heater Freedom részben fel van töltve – A legjobb eredmény érdekében az első használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS: Teljesen feltöltött állapotban a fűtési fokozattól függően 3-6 óra üzemidő várható.


1. A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a kisebbik végét az egység oldalán található töltőporthoz.

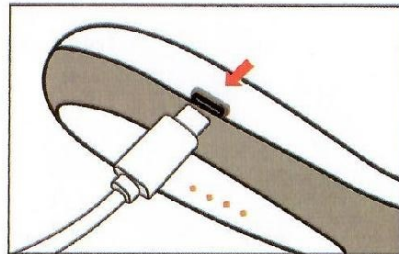

2. Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobbik végét egy USB-tápadapterhez, laptop-hoz vagy más eszöközhöz (nem tartozék).

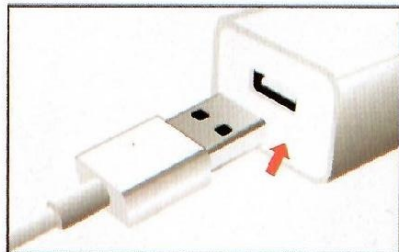


3. A jelzőfények villogni kezdenek, jelezve, hogy az egység töltődik. Ha mind a négy jelzőfény folyamatosan világít, a Handy Heater Freedom teljesen fel van töltve.

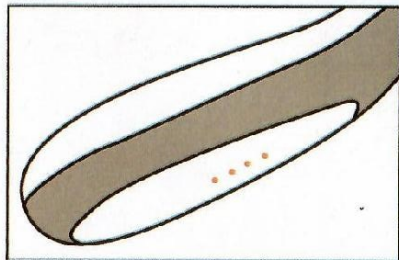

HASZNÁLAT:


1. Helyezze a Handy Heater Freedom-ot a nyakába.

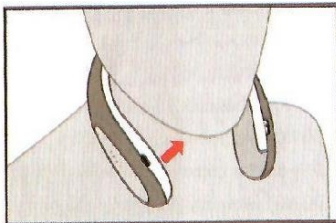

2. Az egység áramellátásának ellenőrzéséhez az egység bekapcsolása előtt nyomja meg az oldalán található bekapcsológombot a bekapcsoláshoz. A jelzőfények világítanak, jelezve, hogy az egység áram alatt

van. Nyomja meg a bekapcsológombot 2-3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Bekapcsoláskor a fűtés alapértelmezés szerint ALACSONY. A gomb minden egyes megnyomásával a készülék megemeli a hőmérsékletét. 4 fűtési fokozat van.

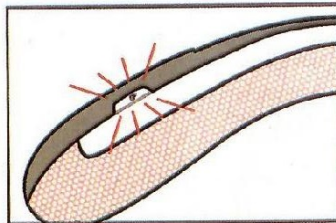

3. Ha végezt, nyomja meg a bekapcsológombot, amíg az egység ki nem kapcsol. Tárolja hűvös, száraz helyen a következő felhasználásig.

KARBANTARTÁS:

Ha nem használja, ügyeljen arra, hogy a Handy Heater Freedom készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.

Szükség szerint tisztítsa meg a foltot nem súroló ronggyal.

HASZNOS FŰTÉS

SZABADSÁG



Termékismertető

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT